



Folkhälsomyndigheten

Provtagningsanvisningar för Acanthamoeba

Provmaterial

- Biopsi eller skrap från hornhinna
- Kontaktlinser, kontaktlinsvätska
- Hud, hjärnbiopsi

Provtagning

Biopsi eller hornhinneskrap

Skrap tas lämpligen med en **rostfri** skalpell. Prov taget med bomullspinne accepteras ej. Materialet sänds i ett sterilt rör fylld med steril 0.9 % NaCl (fysiologisk koksalt). Fyll röret upp till kanten med saltlösningen för att förhindra uttorkning av prov. Ta så mycket material som möjligt eftersom känsligheten för undersökningen är beroende av provvolym. Skalpellen **skall ej** lämnas kvar i röret med 0.9 % NaCl, då det kan påverka känsligheten av odling.

Kontaktlinser

Sänd dem i den linsvätska som användes senast det vill säga flytta inte kontaktlinserna till ren vätska innan transport.

Kontaktlinsvätska

Skicka den i ursprungsförpackningen.

Förvaring och transport

Provet förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Materialet får inte frysas. Provtagning på fredagar rekommenderas inte eftersom försändelsen inte når Folkhälsomyndigheten förrän på måndag.

Adress

Enheten för Parasitologi
Avdelningen för mikrobiologi
171 82 Solna

Telefon 010-205 24 44

Version 7
2020-08-26