



Folkhälsomyndigheten

Provtagningsanvisningar för *Dientamoeba fragilis* och andra trofozoiter

Allmänt om trofozoitdiagnostik

Vissa parasitstadier, t.ex. trofozoiter, kan finnas i avföringsprov och bryts snabbt ner. Det är därför viktigt att avföringsprovet fixeras i **SAF**-fixativ i direkt anslutning till provtagning.

Provtagning

- Sätt till 1-3 skedar nytaget avföringsprov till burken med SAF-fixativ.
(Obs: Mängd feces till SAF-fixativ ska vara ca 1 till 4).
- **Skruva åt locket ordentligt och skaka burken så att provet löser sig i vätskan.**
- Lagg därefter burken i provtagningshylsan.

Förvaring och Transport

Provet kan skickas med vanlig postgång. Om detta inte är möjligt ska provet förvaras i kylskåpet (4°C) tills transporten.

SAF-fixativ går att få av oss om ert laboratorium inte har.

Adress

Folkhälsomyndigheten
Avdelningen för mikrobiologi
Enheten för Parasitologi
Provmottagning
171 82 Solna

Telefon 010-205 24 44 eller kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se

Version 6
2020-02-06